

THORAFLEX

Ein-Flaschensystem

THORAFLEX

Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG	THORAFLEX Thoraxdrainagesysteme dienen zur Ableitung von Blut, Sekreten oder Luft aus dem Pleuraspalt sowie der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Unterdrucks im Plauraspalt.
Anwendungsgebiete	Chirurgischer Bereich (v.a. Thoraxchirurgie)
Anwenderanforderungen	Anwendung ausschließlich von geschultem Personal (examinierte Pflegekräfte und Ärzte).
Patientenzielgruppen	Patienten ohne Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht und Gewicht.
Indikationen in Verbindung mit einer Thoraxdrainage	1. Spannungspneumothorax 2. Pneumothorax 3. Hämatothorax 4. Hämatothorax 5. Chylothorax 6. Serothorax 7. Pleuraempyem 8. Postoperativ nach Thoraxeingriffen
Anwendungshinweise	1. Wasserschloss- und Sekretsammelflasche mit 250 ml sterilem Wasser befüllen. 2. Schlauchsystem fest aufschrauben. Verbindung muss dicht sein. Das Steigrohr zur sicheren Funktion des Wasserschlosses (Rückflusssicherung) bis zur Markierung (ca. 3 cm vom unteren Rohrende) unter der Wasseroberfläche fixieren. 3. Patientenschlauch mit Konnektor an Drainage anschließen. Bei gewünschtem Sog den Vakuumschlauch an die Vakuum-Quelle anschließen. Das Einflaschen-System beinhaltet:

	Schraubaufsatz mit 1 Flasche (1000 ml), Patientenschlauch mit Stufenkonnektor und Kappe, Vakuumschlauch, HEIMLICH-Ventil, markiertes Steigrohr.
Klinischer Nutzen	Wiederherstellung der Druckverhältnisse im Thorax, indem Flüssigkeiten oder Luft über Drainagesysteme aus dem Pleuraspalt befördert werden. Abhängig von der zugrundeliegenden Pathologie wird eine Drainage entweder apikal (Luft) oder kaudal (Flüssigkeiten) platziert.
KONTRAINDIKATIONEN	1. Relativ zur vitalen Bedrohung keine. 2. Ansonsten Gerinnungsstörungen bei Einnahme von gerinnungshemmenden Substanzen.
Warnhinweise	1. Nur nach ärztlicher Anweisung verwenden. 2. Thoraxdrainagesystem unterhalb Thoraxniveau aufrecht befestigen und senkrecht transportieren. 3. Zur Sicherheit Flaschenständer verwenden. 4. Vor Inbetriebnahme alle Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen. 5. Thoraxdrainagesystem ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung Infektionsgefahr. 6. Thoraxdrainagesystem ist steril und pyrogenfrei. Bei beschädigter Verpackung das Thoraxdrainagesystem nicht zu verwenden.
Hinweise zur Lagerung	1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern. 2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Überschreitung der empfohlenen maximalen Lagertemperatur von 30 °C kann zu einer Beeinträchtigung der Qualität führen.
Hinweis zur Entsorgung	Nach nationalem Recht und anerkannten Entsorgungsrichtlinien muss jeder Gesundheitsbetrieb mindestens eine/n Betriebsbeauftragte/n für Abfall (Hygienefachkraft) bereitstellen. Es ist letztlich der Anwender, der entscheidet und über das Wissen verfügt, mit welchen Stoffen die Medizinprodukte kontaminiert werden könnten.

Zusätzliche Medizinprodukte- information					
					
Standard: ISO 15223-1 Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten Weitere Produktinformationen und eIFU: https://www.oriplast.de/produkte/					

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!