

# VENOFLEX

## ADERLASSFLASCHE

Luer-Lock positiv

## Gebrauchsanweisung

	<b>VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.</b>
<b>GERÄTEBESCHREIBUNG</b>	Die Aderlassflasche wird in Kombination mit einem Aderlass-Besteck verwendet, dabei stellt Venoflex-Aderlassflasche eine besonders hygienische Durchführung dar.
<b>ANWENDUNG</b>	Aderlass als „blutentziehendes Verfahren“
<b>Anwendungsgebiete und Zielgruppen</b>	Aderlass für Menschen zur Vorbeugung und Unterstützung der Behandlung bei: <ul style="list-style-type: none"><li>• Übergewicht</li><li>• Diabetes</li><li>• Gicht</li><li>• Durchblutungsstörungen</li><li>• Entzündungen</li><li>• Bluthochdruck</li></ul>
<b>Anwenderanforderungen</b>	Geschultes Personal (examinierte Pflegekräfte und Ärzte)
<b>Indikationen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polycythaemia vera</li><li>• Hämochromatose</li><li>• Polyglobulie</li></ul>
<b>Anwendungshinweise:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie den Beutel unter sterilen Kautelen.</li><li>2. Entnehmen Sie die Flasche aus der sterilen Zweitverpackung.</li><li>3. Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Messfühler auf "0" zeigen.</li></ol>

### Anwendungshinweise (Fortsetzung)

4. Verbinden Sie die Flasche mittels Luer-Lock-Anschluss mit der Kanüle.
5. Öffnen Sie die geschlossene Schlauchklemme an der Flasche.
6. Aderlassflasche saugt selbständig.

**Die Flasche ist ohne Vakuum, wenn der rote Vakuumanzeiger von der Funktionsstellung in die Grundstellung tritt.**

### Klinischer Nutzen

Verfahren zur Minderung der Blutmenge.

### KONTRAINDIKATIONEN

#### **Nebenwirkungen und wann Aderlass gefährlich ist:**

Durch den Blutverlust kann der Blutdruck manchmal sehr stark absinken. Tritt diese Nebenwirkung beim Aderlass ein, wird die Behandlung abgebrochen. Sonst drohen Schwindel bis hin zur Ohnmacht.

Keine Anwendung bei Menschen mit einem zu niedrigen Blutdruck (Hypotonie) oder Blutarmut.

Weitere Kontraindikationen von Aderlässen sind:

- Durchfall
- Infektionen
- Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
- Herzrhythmusstörungen
- körperliche Schwäche (etwa Senioren oder Kinder)
- Schwangerschaft

Dehydratation des Patienten

### Warnhinweise

**Keine Verwendung bei beschädigter Innenverpackung.**

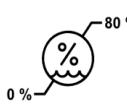
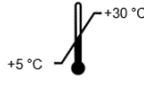
**Zum Einmaligen Gebrauch.**

### Hinweise zur Lagerung

1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern.

2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Hinweis zur Entsorgung** Nach nationalem Recht und anerkannten Entsorgungsrichtlinien muss jeder Gesundheitsbetrieb mindestens eine/n Betriebsbeauftragte/n für Abfall (Hygienefachkraft) bereitstellen. Es ist letztlich der Anwender, der entscheidet und über das Wissen verfügt, mit welchen Stoffen die Medizinprodukte kontaminiert werden könnten.

<b>Zusätzliche Medizinprodukte-information</b>					
					
					

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!