

Spezialkatheter

Gebrauchsanweisung

	<p>VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.</p>
GERÄTEBESCHREIBUNG	Spezialkatheter, Länge: 300 mm, Ch. 30, einseitig mit Trichter, einseitig mit 2 Augen und zentraler Öffnung, gerade und gebogen
ANWENDUNG	Der Katheter ist in Kombination mit Sekretbeutel und Stufenkonnektor für die Reinigung des Darms geeignet.
Anwendungsgebiete	Medizinische- und Pflegebereiche
Patientenzielgruppen:	Patienten ohne Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht und Gewicht.
Indikationen	<ul style="list-style-type: none"> • Obstipation • Bei der Therapie der Anastomoseninsuffizienz bei Rektumresektion • Darmreinigung mittels Darmspülung vor Untersuchungen (Koloskopie, Sigmoidoskopie, Rektoskopie)
Einsatzziele in der Naturheilkunde	<ul style="list-style-type: none"> • Die Regeneration und Heilung der Darmschleimhaut. • Der Abbau von Entzündungsprozessen im Darm. • Die Regulierung der Darmflora und damit die Regulierung und Stärkung des Immunsystems. • Die Eliminierung von schädlichen Darmbakterien und Dampilzen (z. B. Schimmelpilzen, Candida u. a.) und deren Stoffwechselgiften. • Die Ausleitung von Stoffwechselabfallprodukten und Kotsteinen

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aktivierung (bei Verstopfung) oder die Beruhigung (bei Durchfall) der Peristaltik. • Die Entlastung von Leber, Nieren und Lymphsystem. • Abnehmen gehört nicht zu den Hauptzielen!
Nebenwirkungen	<p>Eine Darmreinigung ist kein vorhersehbares Geschehen. Bei jedem vollzieht sich die Ausleitung der Stoffwechselabfallprodukte, der Toxine und Ablagerungen in einer anderen Geschwindigkeit, einem anderen Rhythmus und mit anderen Begleiterscheinungen.</p> <p>So kann es immer mal wieder (vorübergehend!) zu bestimmten Reaktionen kommen (sog. Entgiftungskrisen), wie z. B. zu Kopfschmerzen, unreiner Haut, Verdauungsproblemen oder auch zu einer Verstärkung der aktuellen Gesundheitsprobleme.</p>

Anwendungshinweise:	<p>Zur Darmspülung konnektieren des Katheters über einen Stufenkonnektor mit einem Sekretbeutel (Einlaufbeutel).</p> <p>Mit Hilfe des Sekretbeutels kann kontrollierte Flüssigkeit aus dem Beutel in den Darm geleitet werden. Anschließend wird der Beutel auf den Boden gelegt und der Inhalt kann zurückfließen und das System kann entsorgt werden.</p>
Warnhinweise	<p>Auf eine Darmreinigung sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit verzichtet werden.</p>

Hinweise zur Lagerung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern. 2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
------------------------------	--

Hinweis zur Entsorgung	<p>Nach nationalem Recht und anerkannten Entsorgungsrichtlinien muss jeder Gesundheitsbetrieb mindestens eine/n Betriebsbeauftragte/n für Abfall (Hygienefachkraft) bereitstellen. Es ist letztlich der Anwender, der entscheidet und über das Wissen verfügt, mit welchen Stoffen die Medizinprodukte kontaminiert werden könnten.</p>
-------------------------------	---

Zusätzliche Medizinprodukte- information	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745				
					
					
					