










# Spezialkatheter

## Gebrauchsanweisung

	<p><b>VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.</b></p>
<b>GERÄTEBESCHREIBUNG</b>	Spezialkatheter, Länge: 300 mm, Ch. 30, einseitig mit Trichter, einseitig mit 2 Augen und zentraler Öffnung, gerade und gebogen
<b>ANWENDUNG</b>	Der Katheter ist in Kombination mit Sekretbeutel und Stufenkonnektor für die Reinigung des Darms geeignet.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Medizinische- und Pflegebereiche
<b>Anwenderanforderungen</b>	Anwendung ausschließlich von geschultem Personal (examinierte Pflegekräfte und Ärzte).
<b>Patientenzielgruppen:</b>	Patienten ohne Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht und Gewicht.
<b>Indikationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstipation</li> <li>• Darmreinigung mittels Darmspülung vor Untersuchungen (Koloskopie, Sigmoidoskopie, Rektoskopie)</li> </ul>
<b>Einsatzziele in der Naturheilkunde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Regeneration und Heilung der Darmschleimhaut.</li> <li>• Der Abbau von Entzündungsprozessen im Darm.</li> <li>• Die Regulierung der Darmflora und damit die Regulierung und Stärkung des Immunsystems.</li> <li>• Die Eliminierung von schädlichen Darmbakterien und Dampilzen (z. B. Schimmelpilzen, Candida u. a.) und deren Stoffwechselgiften.</li> <li>• Die Ausleitung von Stoffwechselabfallprodukten und Kotsteinen</li> <li>• Die Aktivierung (bei Verstopfung) oder die Beruhigung (bei Durchfall) der Peristaltik.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Entlastung von Leber, Nieren und Lymphsystem.</li> <li>• Abnehmen gehört nicht zu den Hauptzielen!</li> </ul>
<b>Anwendungshinweise:</b>	<p>Zur Darmspülung konnektieren des Katheters über einen Stufenkonnektor mit einem Sekretbeutel (Einlaufbeutel).</p> <p>Mit Hilfe des Sekretbeutels kann kontrollierte Flüssigkeit aus dem Beutel in den Darm geleitet werden.</p> <p>Anschließend wird der Beutel auf den Boden gelegt und der Inhalt kann zurückfließen und das System kann entsorgt werden.</p>
<b>Nebenwirkungen</b>	<p>Eine Darmreinigung ist kein vorhersehbares Geschehen. Bei jedem vollzieht sich die Ausleitung der Stoffwechselabfallprodukte, der Toxine und Ablagerungen in einer anderen Geschwindigkeit, einem anderen Rhythmus und mit anderen Begleiterscheinungen.</p> <p>So kann es immer mal wieder (vorübergehend!) zu bestimmten Reaktionen kommen (sog. Entgiftungskrisen), wie z. B. zu Kopfschmerzen, unreiner Haut, Verdauungsproblemen oder auch zu einer Verstärkung der aktuellen Gesundheitsprobleme.</p>
<b>Klinischer Nutzen</b>	Siehe den klinischen Indikationen.
<b>KONTRAINDIKATIONEN</b>	<p>Es sind keine relevanten bekannt.</p> <p>Der Einsatz sollte vom behandelnden Arzt bzw. Teams Patientenspezifisch erfolgen.</p>
<b>Warnhinweise</b>	Auf eine Darmreinigung sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit verzichtet werden.
<b>Hinweise zur Lagerung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5°C bis +30°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern.</li> <li>2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</li> </ol>
<b>Hinweis zur Entsorgung</b>	Nach nationalem Recht und anerkannten Entsorgungsrichtlinien muss jeder Gesundheitsbetrieb

mindestens eine/n Betriebsbeauftragte/n für Abfall (Hygienefachkraft) bereitstellen. Es ist letztlich der Anwender, der entscheidet und über das Wissen verfügt, mit welchen Stoffen die Medizinprodukte kontaminiert werden könnten.

<b>Zusätzliche Medizinprodukte- information</b>					
					
<b>Standard: ISO 15223-1 Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten</b> Weitere Produktinformationen und eIFU: <a href="https://www.oriplast.de/produkte/">https://www.oriplast.de/produkte/</a>					

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!