

ORIFLEX

ORIFLEX I, ORIFLEX II, ORIFLEX III, ORIFLEX IV, ORIFLEX V

Gebrauchsanweisung

	VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.
--	--

GERÄTEBESCHREIBUNG	Die vorevakuierten, klarsichtigen Oriflex I-V Reservoirs mit Hochvakuum (675-950 mmHg) oder Mittelvakuum (200-550 mmHg), sowie einem transparenten Verbindungsschlauch, sind für die postoperative Wunddrainage geeignet. Die OP-Systeme (Drainage-Flaschen) werden mit Redon-Drainagen, zur Ableitung von Wundsekret, konnektiert.
---------------------------	---

ANWENDUNG	Die Drainagesysteme dienen der (postoperativen) Wundheilung durch Sog-unterstützten Sekretablauf.
Anwendungsgebiete	Chirurgische Bereiche.
Anwenderanforderungen	Chirurgische Drainagesysteme werden ausschließlich von geschultem Personal (examinierte Pflegekräfte und Ärzte) angewendet.
Patientenzielgruppen:	Patienten ohne Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht und Gewicht.
Indikationen	Prophylaktische Indikation • Ziel: Vermeidung einer (meist postoperativen) Flüssigkeitsansammlung mit lokaler Druckerhöhung und/oder zweizeitiger Superinfektion Diagnostische Indikation (Zieldrainage): • Ziel: Überwachung von Risikogebieten für Blutungen, Insuffizienzen Therapeutische Indikation:

	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele: Sekretablenkung aus Gelenken, Subkutan- oder Subfaszialgewebe, Epiduralraum oder unterhalb der Galea aponeurotica, Spülung bei septischen Herden <p>Palliative Indikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziele: Entlastung bei Stenosen durch maligne Prozesse, Ableitung übermäßig gebildeter Sekrete, Umgehung von Stenosen
<p>Anwendungshinweise:</p>	<p>Wunddrainagesystem / Wechselflasche (Hochvakuum und Mittelvakuum)</p> <p>Steril ETO/Gas, Einmalprodukt, nur in unbeschädigter Verpackung innen und außen steril, pyrogenfrei und nur bei „Max“ Vakuumanzeige verwenden. Bei Wiederverwendung Infektionsgefahr! Anwendung nur durch geschultes Personal.</p> <p>Sicherheitshinweise auf: www.oriplast.de</p> <p>GEBRAUCH DER FLASCHE (OP-SYSTEM):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie das Peel-Pack unter sterilen Kautelen. 2. Entnehmen Sie die Flasche aus der Zweitverpackung steril. 3. Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Messfühler auf "Null" zeigen. 4. Schneiden Sie den Abschneideverbinder auf die benötigte Charrière-Größe (Ch.) ab. 5. Schließen Sie die angelegte Drainage an den Abschneideverbinder an bzw. drehen Sie den Drehverbinder um die Drainage fest. 6. Öffnen Sie die geschlossene Schiebeklemme an der Flasche. 7. Die Sekretflasche saugt selbstständig. <p>ACHTUNG: Die Flasche ist ohne Vakuum, wenn die Messfühler auf "Null" zeigen.</p> <p>Die Sekretflasche muss dann gegen eine neue evakuierte Flasche (Wechselflasche) ausgetauscht werden.</p> <p>ANSCHLUSS DER WECHSELFLASCHE (STATION-SYSTEM):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Verschließen Sie die Schiebeklemme am Verbindungsschlauch (falls vorhanden). b) Verschließen Sie die Schiebeklemme an der Flasche, und entfernen Sie den Verbindungsschlauch von dem roten Gummianschluss oder der QL-Verschraubung. c) Verbinden Sie die neue Flasche mit dem Verbindungsschlauch.

	<p>d) Öffnen Sie die Schiebeklemme am Verbindungsschlauch (falls vorhanden). e) Öffnen Sie die Schiebeklemme an der Flasche. f) Sekretflasche saugt selbstständig. ACHTUNG: Kein Hausmüll. Die benutzten Flaschen sind nach dem Gebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen.</p>
--	---

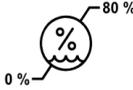
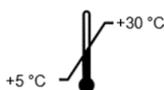
Klinischer Nutzen	Kontinuierlicher Sekretabfluss aus dem Wundbereich bei gleichzeitig maximalem Infektionsschutz.
--------------------------	---

KONTRAINDIKATIONEN	<p>Generell sollten die prophylaktisch angelegten Drainagen sehr zurückhaltend ein-gesetzt werden und nicht zu lange liegen.</p> <p>Für die folgenden Eingriffe wird die Anwendung bei komplikationslosem OP-Verlauf nicht empfohlen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine Weichteildrainagen nach unkomplizierter Hüft-TEP, Knie-TEP, Leistenhernien-OP, Schilddrüsen-OP.
---------------------------	---

Warnhinweise	<p>Die Anlage einer Drainage sollte stets kritisch geprüft werden und nur nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung erfolgen.</p> <p>Entfernung der Drainage: Nach 1–3 Tagen!</p> <p>Keine Verwendung bei beschädigter Innenverpackung.</p> <p>Zum Einmaligen Gebrauch.</p>
---------------------	--

Hinweise zur Lagerung	<ol style="list-style-type: none">1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern.2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
------------------------------	--

Hinweis zur Entsorgung	<p>Nach nationalem Recht und anerkannten Entsorgungsrichtlinien muss jeder Gesundheitsbetrieb mindestens eine/n Betriebsbeauftragte/n für Abfall (Hygienefachkraft) bereitstellen. Es ist letztlich der Anwender, der entscheidet und über das Wissen verfügt, mit welchen Stoffen die Medizinprodukte kontaminiert werden könnten.</p>
-------------------------------	---

Zusätzliche Medizinprodukte- information					
					
					

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!