

SF Spritze

Gebrauchsanweisung

	VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANWENDUNG	Verabreichung von Injektionen und Blutabnahme zur Diagnostik.
Anwendungsgebiete	Alle Medizinische Bereiche wie z.B. Anästhesie, Innere Medizin, Chirurgie Bereiche
Patientenzielgruppen:	Patienten ohne Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht und Gewicht.

Indikationen	<ol style="list-style-type: none">1. Steriles Medizinprodukt zum kurzzeitigen, einmaligen Gebrauch für die intravenöse, subkutane, intradermale und intramuskuläre Verabreichung von Injektionen oder medizinischen Flüssigkeiten unmittelbar nach dem Befüllen sowie für die Blutentnahme.2. Behandlung und Linderung von Krankheiten. Injektion medizinischer Flüssigkeiten in bestimmbarer Dosierung in den Körper.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegenindikationen	<ol style="list-style-type: none">1. Das Medizinprodukt darf nur im festgelegten Anwendungsbereich verwendet werden.2. Das Medizinprodukt sollte nicht zur Verabreichung von Blut und Blutkomponenten verwendet werden.3. Das Medizinprodukt sollte nicht zur Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen und Flüssigkeitsderivate verwendet werden.4. Das Medizinprodukt sollte nicht für Injektionen von lichtempfindlichen Lösungen verwendet werden.5. Das Medizinprodukt sollte nicht mit hochviskosen Flüssigkeiten verwendet werden.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anwendungshinweise

1. Überprüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit und gültige Haltbarkeit. Nicht verwenden, wenn die Primärverpackung beschädigt ist, Fremdstoffe enthält. Entnehmen Sie danach unter aseptischen Bedingungen die Spritze aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie vor der Injektion die richtige Größe von Spritze und Kanüle. Bei Unregelmäßigkeiten, Fremdstoffen oder, wenn die Schutzkappe der Kanüle abgefallen ist, nicht verwenden.
3. Wählen und säubern Sie sorgfältig die Injektionsstelle an der Vene oder am Muskel.
4. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe der Kanüle, um Beschädigungen der Kanülenspitze zu vermeiden.
5. Drücken und drehen Sie die Kanüle an der Spritzen spitze im Uhrzeigersinn, um sie fest anzudrücken und einen festen Sitz zu gewährleisten.
6. Entfernen sie vor der Injektion mögliche Luftbläschen im Spritzenkörper.
7. Desinfizieren Sie die Injektionsstelle.
8. Das Medizinprodukt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht erneut sterilisiert werden. Die Spritze muss nach erstmaliger Verwendung entsorgt werden, da es extrem schwierig ist, sie nach Verwendung gründlich von biologischen Rückständen zu reinigen, was bei Patienten zu möglichen Reaktionen führen kann. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für direkte Neben- und Folgeschäden, die aus einer Wiederverwendung resultieren.

Warnhinweise

1. Das Medizinprodukt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
2. Das Medizinprodukt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung des Medizinproduktes kann zu möglicherweise zu ernsthaften Infektionen, Kreuzkontaminationen, Übertragung von Bakterien, Viren, transfusionsbedingten HIV-Viren und Hepatitis sowie Einschränkungen von Leistungs- und Funktionsparametern führen.
3. Überzeugen Sie sich vor Verwendung von der Unversehrtheit des Medizinproduktes und der Verpackung.
4. Lesen Sie vor Verwendung die Gebrauchsanweisung.
5. Überprüfen Sie die gültige Haltbarkeit.

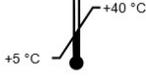
Warnhinweise (Fortsetzung)

6. Das Medizinprodukt darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.
7. Verwenden Sie das Medizinprodukt unmittelbar nach Öffnung der Verpackung.
8. Das Medizinprodukt darf nur durch Ärzte und geschultes medizinisches Personal verwendet werden.
9. Nicht mit Arzneimitteln verwenden, die mit Plastik reagieren.
10. Nicht mit hochviskosen Flüssigkeiten verwendet werden.
11. Vermeiden sie während der Injektion die Entstehung von Luftbläschen in der Spritze.
12. Verwenden Sie keine bereits genutzten Kanülen.
13. Um Infizierungen zu vermeiden, sollten während einer Venenpunktion Handschuhe getragen werden.
14. Seien Sie vorsichtig bei der Blutentnahme bei in der Mobilität eingeschränkten, unter Bluterkrankheit leidenden oder epileptischen Patienten.
15. Wegen der Gefahr einer Oberflächenverunreinigung durch Blutreste an der Kanülenspitze wird empfohlen, die Kanüle und die Spritze mit der Spitze separat nach oben zu entsorgen.
16. Nach Verwendung ordnungsgemäß entsorgen. Nicht aufbereiten, säubern oder sterilisieren.
17. Unsachgemäßer Transport und Beschädigungen können zu strukturellen und / oder funktionellen Einschränkungen des Medizinproduktes oder der Verpackung führen.
18. Während der Blutabnahme ist die Rotation der Kolbenstange verboten.
19. Nicht für Paraldehyde und Medikamente, die mit Polypropylen kontraindiziert sind, einsetzen.
20. Von korrosiven Desinfektionsmitteln fernhalten.
21. Nicht bei Allergie auf Polypropylen verwenden.

Hinweise zur Lagerung

1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern.
2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Überschreitung der empfohlenen maximalen Lagertemperatur von 40 °C kann zu einer Beeinträchtigung der Spritzen- und Kanülenqualität führen.

Hinweis zur Entsorgung	<p>Abfälle von gebrauchten spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten wie Kanülen, Skalpelle und Gegenstände mit ähnlichem Risiko für Schnitt- oder Stichverletzungen müssen in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen gesammelt, fest verschlossen, sicher vor unbefugtem Zugriff bereitgestellt, transportiert und entsorgt werden.</p> <p>(siehe Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 18 - AS 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände)</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusätzliche Medizinprodukte-information	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745				
				CE 0297	
					
					

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!