

# SF Latex Untersuchungshandschuhe unsteril, puderfrei

## Anwendungsanweisung und Anleitung zum An- und Ausziehen



### Verwendungszweck:

Die Handschuhe sind für das Tragen an der Hand des medizinischen Personals bei medizinischen Eingriffen und Untersuchungsverfahren vorgesehen zum Schutz vor Kreuzkontaminationen zwischen dem medizinischem Personal und dem Patienten.

### Indikationen

SF Latex Untersuchungshandschuhe sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und werden bei vorhersehbarem oder wahrscheinlichem Kontakt mit Körperausscheidungen, Sekreten, Exkreten oder Krankheitserregern sowie kontaminierten Flächen verwendet. Dieses Produkt kann von medizinischem Personal während einer ärztlichen Untersuchung getragen werden zum Schutz vor Kreuzkontaminationen zwischen medizinischem Personal und Patienten. Es ist nur geeignet für Personen die nicht an einer Naturkautschuklatexallergie oder Kontaktdermatitis leiden.

### Kontraindikation

Dieses Produkt ist nicht für Personen geeignet, die an einer Naturkautschuklatexallergie oder Kontaktdermatitis leiden.  
Die Wiederverwendung dieses Produkts wird nicht empfohlen.  
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das auf dem Verpackungsmaterial aufgedruckte Verfallsdatum überschritten ist oder das Verpackungssiegel vor der Verwendung geöffnet wurde.

<b>Patientenzielgruppe</b>	Die Zielgruppe der Patienten ähnelt einer normalen Patientengruppe, es muss jedoch berücksichtigt werden, ob die Patienten an einer Latexallergie bzw. Kontaktdermatitis leiden.
<b>Beabsichtigte Benutzer</b>	Puderfreie Latex-Untersuchungshandschuhe zum Tragen durch medizinisches Personal ohne Latexallergie bzw. Kontaktdermatitis .
<b>Vorsicht</b>	<p>Dieses Produkt besteht aus Naturkautschuklatex, der unter anderem allergische Reaktionen hervorrufen kann. Es zu anaphylaktische Reaktionen bei sensibilisierten Personen kommen.</p> <p>Sollte es zu einer Reaktion auf dieses Produkt kommen, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.</p> <p>Dieses Produkt enthält Komponenten oder chemische Zusätze, die allergische Reaktionen bei Personen mit Überempfindlichkeit hervorrufen können.</p> <p>Im Falle einer allergischen Reaktion stellen Sie die Anwendung bitte sofort ein und suchen Sie ärztlichen Rat auf.</p>
<b>Warnhinweis</b>	SF Latex Untersuchungshandschuhe sind Latex haltig und sollten bei bekannter Latex Allergie nicht verwendet werden.
<b>Wechselintervall</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ bei sichtbaren Perforationen;</li><li>➤ bei Kontaminationen mit Blut, Sekreten oder Exkreten;</li><li>➤ nach jedem Patienten;</li><li>➤ nach Beendigung der jeweiligen Anwendung.</li></ul>
<b>Anleitung zum Anziehen</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Führen Sie vor dem Anziehen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion durch.</li><li>2. Nehmen Sie zunächst einen Handschuh aus der Spenderbox.</li><li>3. Fassen Sie den Handschuh am oberen Rand der Stulpe an.</li><li>4. Halten Sie den Handschuh am oberen Stulpenrand fest und ziehen Sie ihn in die richtige Passform. Achten Sie darauf, den Handschuh nicht zu überdehnen, um dadurch ein mögliches Einreißen zu vermeiden.</li></ol>

### Anleitung zum Anziehen (Fortsetzung)

5. Entnehmen Sie den zweiten Handschuh aus der Spenderbox.
6. Ziehen Sie den zweiten Handschuh über und vermeiden Sie dabei die Berührung des Unterarms mit der bereits behandschuhten Hand, indem Sie die Finger der behandschuhten Hand über die Außenseite unter den Stulpenrand des zweiten Handschuhs schieben.
7. Prüfen Sie vor Beginn der Tätigkeit den korrekten Sitz der Handschuhe und korrigieren Sie diesen bei Bedarf ohne freiliegende Hautstellen zu berühren. Überprüfen Sie die Handschuhe auf sichtbare Perforationen.

### Anleitung zum Ausziehen

1. Drücken Sie den ersten Handschuh auf der Höhe des Handgelenks zusammen ohne dabei die Haut des Unterarms zu berühren. Ziehen Sie ihn dann von der Hand weg und kehren ihn von innen nach außen.
2. Halten Sie den entfernten ersten Handschuh in der noch behandschuhten zweiten Hand und bringen Sie die Finger der nun "nackten" Hand zwischen den noch anliegenden Handschuh und das Handgelenk. Entfernen Sie den zweiten Handschuh in dem Sie ihn die Hand hinunterschieben und dabei auch von innen nach außen kehren. Dabei wird der Erste mit eingerollt.
3. Entsorgen Sie das dabei entstandene Handschuhbällchen (Innenseite der Handschuhe ist jetzt außen) direkt in ein bereitstehendes Abfallbehältnis.
4. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch.

### Empfehlungen

- Das Tragen künstlicher, gegelter oder lackierter Fingernägel, Ringe jeder Art und jeglichem Schmuck an Händen und Unterarmen ist untersagt.
- Stellen Sie vor dem Anziehen der Handschuhe sicher, dass die Hände sauber und vollständig trocken sind.
- Zur Verbesserung des Tragekomforts und Tastempfindens sowie zur Vermeidung von Überdehnung und ggf. Reißen des Handschuhs bei zu kleiner Größe wählen Sie immer die für Sie richtige Größe aus.

## Entsorgung

Die Untersuchungshandschuhe müssen gemäß den klinischen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden, da diese Produkte als biologisch gefährlich und nicht abbaubar gelten.